

NEXTDENT FOR CERAMILL MATERIALS - PROCESSING TIMES

MATERIAL	INDICATION	BOTTLE MIXING TIME			STIRRING TIME in Resin Tray	CLEANING TIME			CURING TIME LC 3D Print Box
		Bottle shaking	New Bottle	After first use*		Cleaning solution	Pre-cleaning	Fine-cleaning	
NextDent Cast		5 min.	2.5 h	1 h	60 sec.	Ethanol	3 min.	2 min.	5 min.
NextDent C&B MFH		5 min.	2.5 h	1 h	60 sec.	Ethanol	3 min.	2 min.	30 min.
NextDent Gingiva Mask		5 min.	2.5 h	1 h	60 sec.	Ethanol	3 min.	2 min.	10 min.
NextDent Model 2.0		5 min.	2.5 h	1 h	60 sec.	Ethanol	3 min.	2 min.	10 min.
NextDent Ortho IBT		-	5 min.	5 min.	30 sec.	Ethanol	3 min.	2 min.	10 min.
NextDent Ortho Rigid		-	5 min.	5 min.	30 sec.	Ethanol	3 min.	2 min.	10 min.
NextDent SG / Orange		-	5 min.	5 min.	30 sec.	Ethanol	3 min.	2 min.	10 min.
NextDent Tray		5 min.	2.5 h	1 h	60 sec.	Ethanol	3 min.	2 min.	10 min.
NextDent Try-In		5 min.	2.5 h	1 h	60 sec.	Ethanol	3 min.	2 min.	20 min.
NextDent Denture 3D+		5 min.	2.5 h	1 h	60 sec.	Ethanol	3 min.	2 min.	30 min.

*Considerations for resin that has been sitting, unused, for over 1 month
For more information please see NextDent materials Instructions for Use enclosed in the bottle packaging



NEXTDENT Materiali dentali per la stampa 3D

Indicazioni



Proprietà	Risultato
Consistenza	Viscoso medio, omogeneo
Colore	Secondo lo standard VITA®
Profondità di polimerizzazione (DIN EN ISO 4049)	$\geq 1,5$ mm
Resistenza alla flessione (DIN EN ISO 4049)	> 130 MPa
Modulo E (DIN EN ISO 4049)	> 4000 MPa
Durezza Barcol	> 40
Durata	3 anni
Dispositivo medico	Classe IIa

Il materiale è disponibile in contenitori da 0,5 Kg.

Indicazioni



Proprietà	Requisito	Risultato	Norma ISO
Massima resistenza alla flessione	≥ 65 MPa	84	Certificazione ISO 20795-1
Modulo di flessione	≥ 2000 MPa	2383	Certificazione ISO 20795-1
Assorbimento	≤ 35 $\mu\text{g}/\text{mm}^3$	28	Certificazione ISO 20795-1
Solubilità	$\leq 3,0$ $\mu\text{g}/\text{mm}^3$	0,1	Certificazione ISO 20795-1
Monomero residuo	$\leq 2,2$ % (p/p)	$< 0,1$	Certificazione ISO 20795-1
Biocompatibilità	Non citotossico	Ottemperare	Certificazione ISO 10993-1
Biocompatibilità	Non mutageno	Ottemperare	Certificazione ISO 10993-1



Indicazioni

Proprietà	Requisito	Risultato	Norma ISO
Massima resistenza alla flessione	≥ 50 MPa	70	Certificazione ISO 20795-2
Modulo di flessione	≥ 1300 MPa	1596	Certificazione ISO 20795-2
Max. fattore di intensità dello stress	$\geq 1,1$ MPa m ^{1/2}	1,6	Certificazione ISO 20795-2
Lavoro di frattura totale	≥ 250 J/m ²	675	Certificazione ISO 20795-2
Assorbimento	≤ 65 µg/mm ³	58	Certificazione ISO 20795-2
Solubilità	$\leq 5,0$ µg/mm ³	4,6	Certificazione ISO 20795-2
Monomero residuo	$\leq 5,0$ % (p/p)	< 0,1	Certificazione ISO 20795-2

Stampe di modelli dentali ad alta precisione

NextDent Model 2.0 si caratterizza per il suo alto grado di accuratezza, rendendo questo materiale adatto per modelli dettagliati di protesi master e ortodonzia in cui è necessaria un'elevata precisione. I modelli mostrano dettagli altamente visivi grazie al colore e all'opacità e hanno una superficie ideale per le impronte di scansione.

I modelli stampati accurati sono la base perfetta per creare il tuo pezzo da lavoro dentale. Disponibile nei colori Peach, White e Grey.

[Scarica le istruzioni per l'uso.](#) Per domande specifiche, contatta il tuo rivenditore NextDent autorizzato o [NextDent](#).



Indicazioni

Proprietà	Requisito	Risultato	Norma ISO
Durezza shore D	≥ 80 Shore D	84	Certificazione ISO 178

Esperienza su cui contare

3D Systems ha sfruttato i suoi 30 anni di esperienza nella stampa 3D in combinazione con lo sviluppatore leader di materiali di stampa 3D dentale biocompatibili per fornire la soluzione NextDent 5100. Questa soluzione completa rappresenta i materiali che

definiscono il settore e l'innovazione di stampa, l'esperienza nel settore dentale e la conformità normativa in tutti i principali mercati per rivoluzionare il tuo flusso di lavoro.

Alimentata dalla tecnologia proprietaria di 3D Systems Figure 4™, la nuova stampante 3D NextDent™ 5100 sta già dimostrando la sua capacità di rivoluzionare veramente il flusso di lavoro dentale. Compatibile con soluzioni di scansione dentale e intraorale, con una velocità di stampa 4 volte superiore alle altre stampanti della sua categoria, garantisce precisione, ripetibilità e costi inferiori rispetto ai sistemi fino ad oggi nel mercato o alle tradizionali tecniche di produzione manuali. A corredo della macchina vengono inoltre forniti il miscelatore delle resine e il forno di polimerizzazione per garantire ulteriormente la qualità del prodotto finale. Il sistema NextDent™ 5100 è completato da un portafoglio di 30 resine NextDent uniche, il più grande numero disponibile rispetto a qualsiasi altro fornitore di materiali dentali di stampa 3D. Offerti in una varietà di colori estetici, questi materiali consentono ai laboratori odontotecnici e alle cliniche di realizzare porta impronte, modelli, guide chirurgiche, provvisori, bite, calcinabili e protesi totali. Tutti i materiali di stampa 3D dentali NextDent sono biocompatibili, certificati CE e FDA. La CMF Marelli, distributore in Italia della NextDent™ 5100, a sua volta è certificata EN ISO 13485 specifica per dispositivi medici.



APPLICAZIONI

Soluzione digitale odontoiatrica completa per 12 indicazioni in una gamma di 30 materiali NextDent:

- Modelli ortodontici
- Modelli di corone e ponti
- Provvisori a lungo termine
- Restauri in cera
- Guide chirurgiche
- Splint
- Bite notturni
- Protesi dentarie provvisorie e definitive